

クイックスタートガイド：SENTIERO ADVANCED ABRスクリーニング (ゴールドラベル)

電源のオン/オフ、デバイスの充電



右側の電源
ボタン



電源コネクタ

スタートメニュー

注：この画面（テストオプション）は、設定によって異なる場合があります



クイックスタートガイド：SENTIERO ADVANCED ABRスクリーニング (ゴールドラベル)

検査


聴性脳幹反応 (ABR) スクリーニング

ABRのスクリーニング検査については、片耳検査の説明をしています。両耳検査の手順については、ABR診断クイックスタートガイドをご参照ください


電極ケーブルを



を白いコネクタに、プローブを赤いコネクタに接続してください。

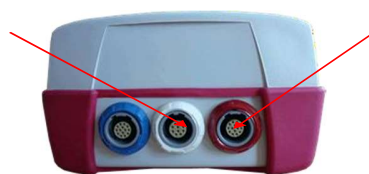

被検者の皮膚を清拭し、電極パッドを装着してください。クリップを対応する部位に接続してください。推奨される配置は以下の通りです：

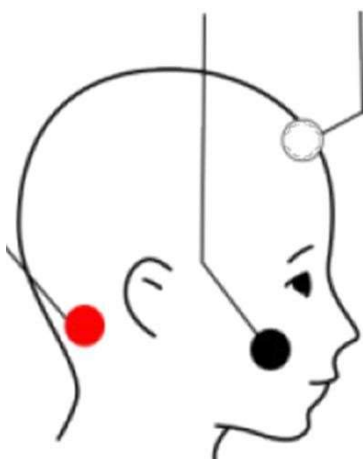

白：額の上

黒：頬

赤：乳様突起

クイックスタートガイド：SENTIERO ADVANCED ABRスクリーニング (ゴールドラベル)

適切なサイズのイヤーチップを選び、プローブの先端に取り付けます。イヤーチップが外耳道にしっかりとフィットするように、プローブを耳に挿入してください。

「QuickABR」を選択します。

右ボタンまたは左ボタンを押して、検査する耳を選択してください。




測定の前にキャリブレーションが行われます。緑色のライトが点灯すれば、キャリブレーションは正常に完了しています。

また、測定前にインピーダンスチェックが行われます。最適な測定結果を得るためには、インピーダンスが6kΩ以下であることが推奨されます。

イヤープローブのキャリブレーションとインピーダンスチェックが正常に完了すると、テストが自動的に開始されます。

黄色または赤色のランプが点灯した場合は、正しいプローブチップとイヤーチップのサイズを使用しているか、イヤーチップが正しく装着されているか、また周囲の騒音が過度ではないかを確認してください。

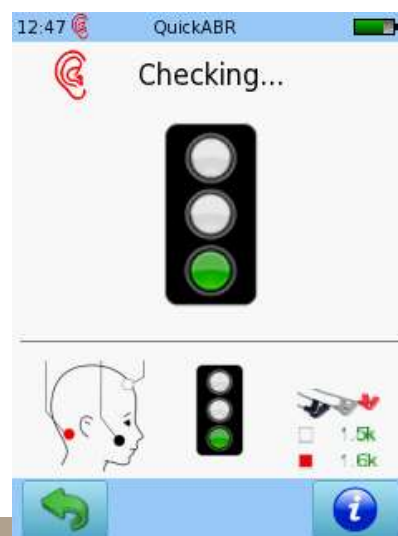

クイックスタートガイド：SENTIERO ADVANCED ABRスクリーニング (ゴールドラベル)

ABRスクリーニングテスト画面

15:40 QuickABR

0.5µV

0 2 4 6 8 10 ms

35 dB eHL

ABR

4.1k

3.3k

反応検出バー

選択した年齢層の基準データ：赤 -III波、
緑 -V波

画面を上下にスワイプして表示スケールを変更

進行中のEEG-値は下3分の1の範囲内に収まるべき

インピーダンスモニター - 最適な結果を得るには、インピーダンスが6 kΩ未満である必要があります

テストの進行状況

テストを停止

テストの一時停止/再開

ABRスクリーニング検査の結果

15:44 QABR35

0.5µV

0 2 4 6 8 10 ms

Valid response

Stimulus	Chirp 35dB eHL
Averages	9808
EEG	46nV
Impedance	3.7k / 3.1k

もう一方の耳を検査する

画面を上下にスワイプして表示スケールを変更

スクリーニング検査の総合結果

パラメータと条件のテスト

結果をラベルまたはPDFファイルに出力する

クイックスタートガイド：SENTIERO ADVANCED ABRスクリーニング (ゴールドラベル)

クイックガイド情報

公開日:	2016年12月22日
改訂版:	01
有効日:	ファームウェア Rev. 2.1、Mira PCソフトウェア Rev. 1.6.4
対象:	モデル：SOH100360、Web上の説明：SOH06、SOH07、SOH08、およびSOH09

記載されているすべての項目、製品、ブランド、および商標は、記載の企業によって登録または所有されています。

本マニュアルに記載されているすべての情報、図解、および仕様は、発行時点で入手可能な最新の製品情報に基づいています。PATH MEDICALは、予告なしにいつでも変更する権利を留保します。

当社のウェブサイトや広告資料に掲載されているすべての製品が、すべての地域で入手可能であるとは限りませんのでご注意ください。詳細については、お近くの販売代理店またはPATH MEDICALまでお問い合わせください。

『クイックスタートガイド』の最新版は、www.pathme.de/download からオンラインでご覧いただけます。誤字脱字は免責となります。

著作権表示

本マニュアルのいかなる部分も、PATH MEDICAL GmbHの事前の書面による同意なしに、電子的、機械的、複写、録音、その他のいかなる形式または手段によっても、複製、翻訳、保存、または送信することはできません。

Copyright © 2016 PATH MEDICAL GmbH

PATH MEDICAL GmbH
Landsberger Straße 65
82110 Germering
ドイツ



0124

電話：+49 89 800 76 502

Fax: +49 89 800 76 503

ウェブサイト: www.pathme.de