

クイックスタートガイド

MIRA SWにおける言語設定の変更方法（すべてのPATH医療機器に適用）

Miraをご利用になる前に、お使いのMiraソフトウェアのバージョンが最新であることをご確認ください。お使いのPCにMiraソフトウェアの最新版をインストールするには、以下のアドレスから最新バージョンのリンクにアクセスしてください：

 <https://pathme.de/support/#downloads>

このリンクをクリックすると、PATH MEDICALのウェブサイトにあるダウンロードページに移動します。そのページは、以下の図1に示されています。

下線付きの「[download](#)」という単語をクリックして、Miraソフトウェアのダウンロードリンクにアクセスしてください。ダウンロードには数分かかる場合があります。

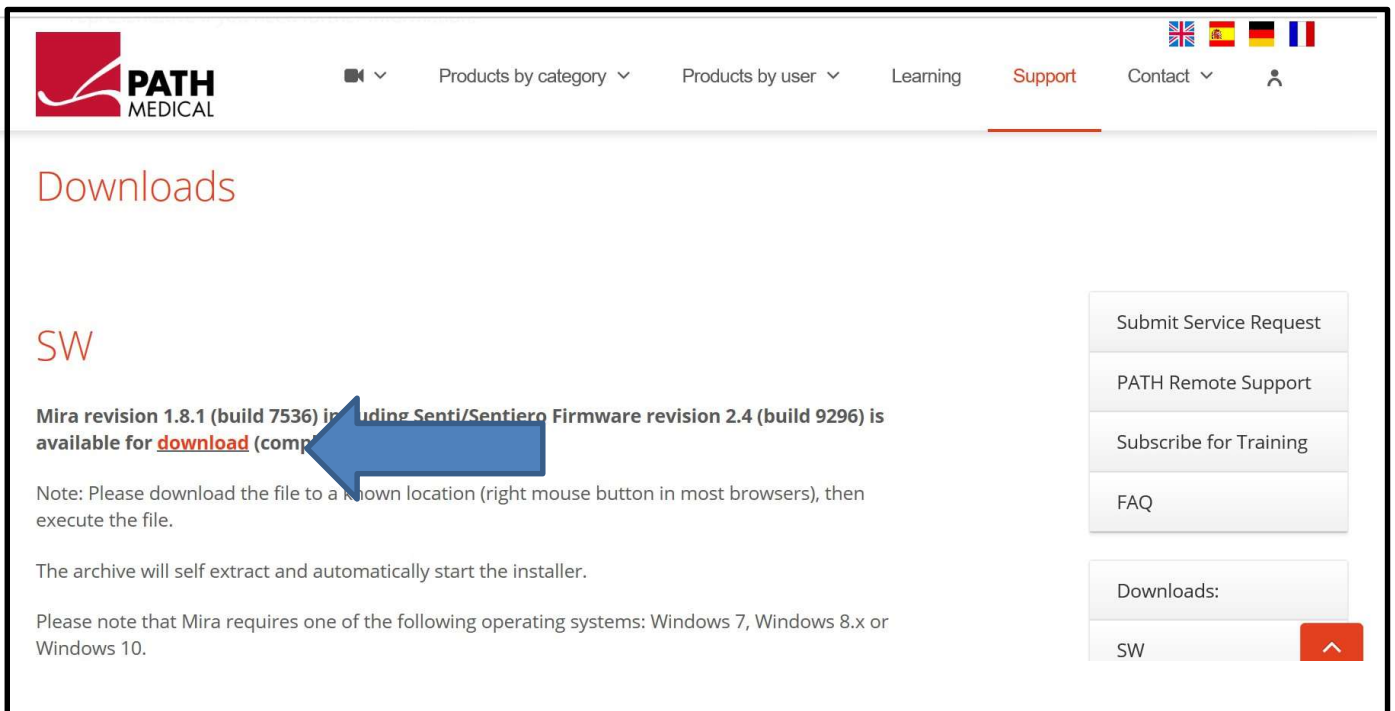


図1

コンピュータのデスクトップにあるアイコンをクリックして、Miraを開いてください



図2

クイックスタートガイド

MIRA SWにおける言語設定の変更方法（すべてのPATH医療機器に適用）

Miraが起動すると、次のようなダイアログが表示されます：



Your Credentials

Name

Password

Enter login name and password and click on Login.

Login

図3


ユーザー名に「admin」、パスワードに「1234」を入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてソフトウェアにログインします。ログイン後、図4に示すように

「マイ設定」タブをクリックします。



図4

ドロップダウンメニューから、ユーザー言語として希望する言語を選択します（図5）。

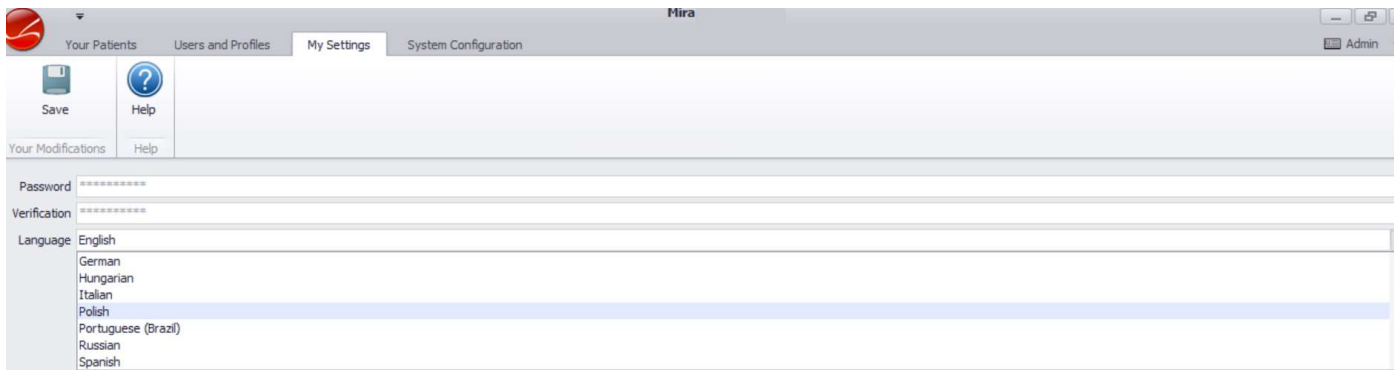

Save Help

Your Modifications Help

Password *****

Verification *****

Language

- English
- German
- Hungarian
- Italian
- Polish
- Portuguese (Brazil)
- Russian
- Spanish

図5

クイックスタートガイド

MIRA SWにおける言語設定の変更方法（すべてのPATH医療機器に適用）

Miraのベース言語（ユーザーログインなどに使用される言語）を設定するには、「システム設定」タブを選択します（図6を参照）。



図6

ドロップダウンメニューから、Miraのベース言語として設定したい言語を選択します（図7）。

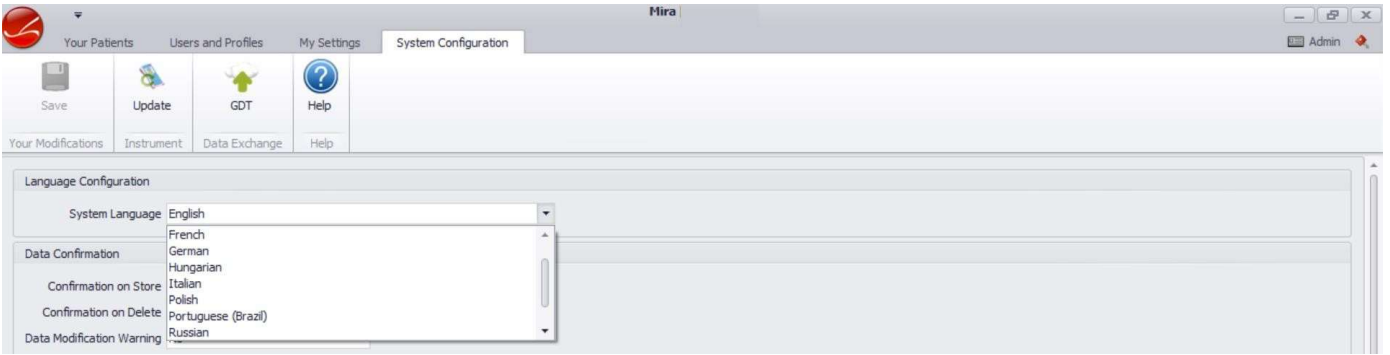


図7

言語を選択したら、変更を保存してください（図8）。

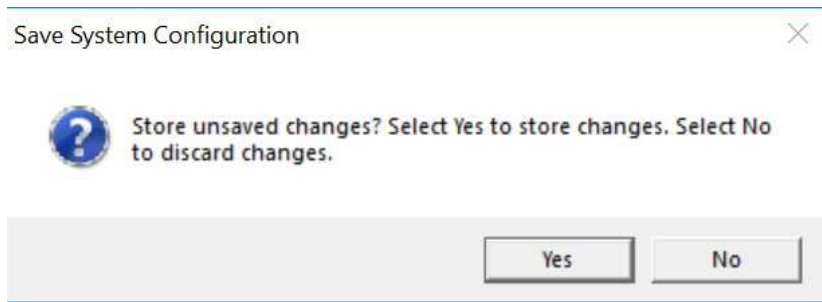


図8

クイックスタートガイド

MIRA SWにおける言語設定の変更方法（すべてのPATH医療機器に適用）

クイックガイド情報

公開日：	2019年1月29日
改訂版：	100800-29_01
有効日：	ファームウェア Rev. 2.5.9582、Mira PC ソフトウェア Rev. 2.0.0
対象：	すべてのPATH MEDICAL製デバイス

記載されているすべての項目、製品、ブランド、および商標は、記載の企業によって登録または所有されています。

本マニュアルに記載されているすべての情報、図、および仕様は、発行時点で入手可能な最新の製品情報に基づいています。PATH MEDICALは、予告なしにいつでも変更する権利を留保します。

当社のウェブサイトや広告資料に掲載されているすべての製品が、すべての地域で入手可能であるとは限りませんのでご注意ください。詳細については、お近くの販売代理店またはPATH MEDICALまでお問い合わせください。。

『クイックスタートガイド』の最新版は、www.pathme.de/download からオンラインでご覧いただけます。誤字脱字は免責となります。

著作権表示

本マニュアルのいかなる部分も、PATH MEDICAL GmbHの事前の書面による同意なしに、電子的、機械的、複写、録音、その他のいかなる形式または手段によっても、複製、翻訳、保存、または送信することはできません。

Copyright © 2019 PATH medical GmbH

PATH medical
GmbH Landsberger Straße 65
82110 Germering

ドイツ

電話番号：+49 89 800 76 502

Fax: +49 89 800 76 503

ウェブサイト: www.pathme.de



0124

